

Mission®

Lancetēšanas ierīce

Pakas pielikums

REF C121-3055

Latviešu


PRINCIPS UN LIETOSĀNA

Mission® Lancetēšanas ierīce ir lietojama kopā ar sterilām lancetēm, lai iegūtu kapilāru asinis no pirksta gala.

LIETOSĀNAS PAMĀCĪBA

Lai veiktu testu, nodrošiniet tīru un sausu darbavietu. Iepazīstieties ar procedūru un pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, lai iegūtu asins pilienus.


Svarīgi: Pirms veikt procedūru notīriet dūriena laukumu ar spirtu vai ziepju ūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet siltu ūdeni, lai palielinātu asins plūsmu. Pēc tam nosusiniet jūsu rokas un dūriena laukumu. Pārliecinieties, ka dūriena vietā nav krēma vai losjona.

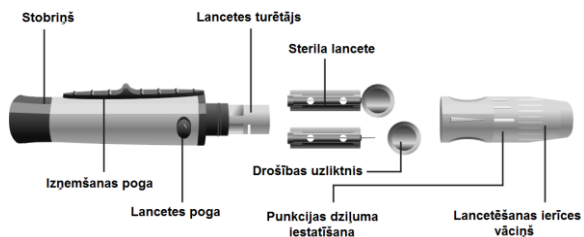


Pārauga iegūšana no pirksta gala

Lai iegūtu asins pilienus no pirksta gala, uzstādi lancetes garumu, lai samazinātu pacienta diskomfortu. Jums nav nepieciešams tīrs vāciņš, iegūstot paraugu no pirksta gala.


1. Atskrūvējiet lancetēšanas ierīces vāciņu no lancetēšanas ierīces korpusa. Ievietojiet sterilu lanceti lancetes turētājā un uzspiediet līdz tā fiksējas.

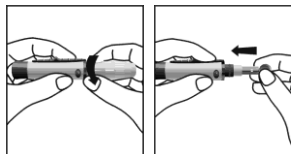


2. Cieši turiet lanceti un uzmanīgi noņemiet lancetes drošības uzliktni. Nemetiet ārā lancetes uzliktni, lai to varētu izmantot lancetes utilizācijā.

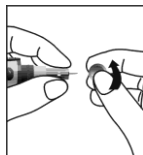

3. Uzmanīgi uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ uz lancetēšanas ierīces. Nepieskarieties atklātajai adai. Pārliecinieties, ka apvalks ir pilnībā aizvērts.

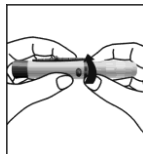


4. Uzstādi punkcijas dziļumu, rotējot lancetēšanas ierīces vāciņu. Kopā ir 6 punkcijas dziļuma režīmi. Lai samazinātu diskomfortu, izmantojiet mazāko punkcijas dziļumu, kura rezultātā ir pietiekams asins pilienis.

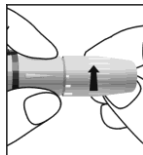


Izmantojiet 1 un 2 režīmu jūtīgai ādai, 3 un 4 normālai ādai un 5 un 6 rupjai un biežai ādai.

Piezīme: Lielāks lancetēšanas ierīces spiediens uz ādu arī palielinās punkcijas dziļumu.


5. Paveiciet aiz stobriņa. Iespējams dzirdēsiet klikšķi. Ierīce tagad ir piepildīta un gatava asins piliena iegūšanai.

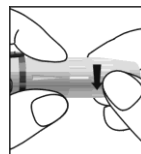


6. Pirms testa veikšanas, notīriet savas rokas ar spirtu vai nomazgājiet rokas ar ziepēm. Izmantojiet siltu ūdeni, lai palielinātu asins plūsmu jūsu pirkstos. Masējiet plaukstu virzienā no plauksta locītavas uz pirksta galu. Šādu darbību veiciet pāris reizes, lai palielinātu asins plūsmu.

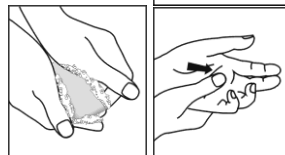


7. Turiet lancetēšanas ierīci pret to pirksta pusi, kurā veiksiet dūrienu. Turiet lanceti tā lai tās vāciņš pieskartos pirkstam. Uzspiediet lancetes pogu, lai pārdurotu pirksta galu. Jābūt dzirdamam klikšķim, kad lancete iziet ārā. Maigi masējiet pirkstu virzienā no pirksta pamatnes uz pirksta galu, lai iegūtu nepieciešamo asiņu daudzumu. Nepieļaujiet asins pilienus smērēšanai.

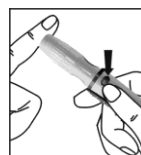

Piezīme: Lai sāpes būtu mazākas, veiciet lancetēšanu pirkstu galu sānos. Ja ir nepieciešamība vēlreiz ņemt asinis no pirksta, tad ņemiet asinis no citas puses, vai cita pirksta. Vairākas punkcijas vienā vietā var izraisīt pušumu vai pampumu.

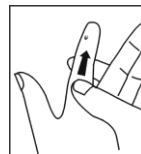

8. Atskrūvējiet lancetēšanas ierīces vāciņu. Uzmanīgi uzlieciet lanceti drošības uzliktni.

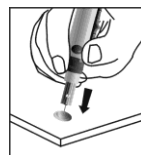

9. Nospiediet lancetes pogu, lai pārliecinātos, ka lancete ir pareizā pozīcijā. Slidiniet izņemšanas pogu uz priekšu, lai izņemtu lietoto lanceti. Uzlieciet lancetēšanas ierīcei vāciņu.



LANCETĒŠANAS IERĪCES APKOPE

Notīriet lancetēšanas ierīci izmantojot mīkstu lupatu ar ziepēm un siltu ūdeni. Izmantojiet 70% izopropil spirtu, lai dezinficētu lancetēšanas ierīci. Uzmanīgi nosusiniet lancetēšanas ierīci. Nemērciet lancetēšanas ierīci šķīdumā.

BRĪDINĀJUMI

- Neizmantojiet lanceti, ja izņemot to no iepakojuma, tai nav drošības uzliktņa.
- Neizmantojiet lanceti ja adata ir salocīta.
- Rīkojieties piesardzīgi, kad lancetes adata ir atklāta.
- Nedodiet citiem cilvēkiem lanceti vai lancetēšanas ierīci.
- Lai samazinātu inficēšanās risku, vienmēr izmantojiet jaunu, sterilu lanceti. Neizmantojiet vienu lanceti vairākas reizes.
- Nepieļaujiet lancetes nosmērēšanai ar roku losjonu, eļļu, netīrumiem vai nogulsniem.

GARANTĪJA

Ja lancetēšanas ierīce kāda iemesla dēļ nestrādā, (izņemot gadījumus, kad bojājums ir radies lietotāja dēļ), tad 5 gadu laikā, no pirkuma veikšanas datuma, mēs aizvēsim to ar jaunu vai ekvivalentu lancetēšanas ierīci bezmaksas. Sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pārstāvi, lai nomainītu lancetēšanas ierīci.

Simbolu skaidrojums

	Skatīt instrukcijas		Ražotājs
REF	Katalogs #		Lietot ar
	Pilnvarotais pārstāvis		Lota numurs

ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road,
San Diego, CA 92121, USA



SIA „Invitros”
Viskaļu iela 11, Rīga,
LV-1026, Latvija

SIA „Invitros” tulkojums no angļu valodas oriģinālās instrukcijas.
Tulkoja: Nauris Zdanovskis 020890 - 12103
Datums: 24.11.2010

Numurs: 1150567401
Izveidots: 2010-09-02