

Gēls CEREDERM®

Silikona gēls

Caurspīdīgs un lietošanā vienkāršs gēls CEREDERM® paredzēts jebkuras izcelsmes hipertrofisko un keloīdo rētu ārstēšanai.

ĪPAŠĪBAS

Gēla CEREDERM® komponenti tika speciāli atlasīti to lieliskas panesamības dēļ. Gēlam piemītošās īpašības kombinācijā ar ekskluzīvu tehnoloģiju nodrošina uzklāšanas ērtumu, ātru nožāvēšanu un ilgstošu iedarbību.

KONTRINDIKĀCIJAS

- atklātas brūces;
- čūlas;
- kreveles;
- izsvīdums;
- nesadzījuši apdegumi.

BLAKUS IEDARBĪBA

Gēla CEREDERM® lietošana dažos gadījumos var izsaukt blakus iedarbību, piemēram, ādas reakciju (eritēmu, niezi utt.), atklātas brūces vai sāpes. Piesardzības pasākumu un kontrindikāciju ievērošana lietošanā ļauj ierobežot nevēlamu parādību rašanās iespēju. Ja konstatētas blakus parādības, ieteicams uz laiku pārtraukt gēla CEREDERM® lietošanu. Ārstēšanu var turpināt pēc normāla stāvokļa atjaunošanās.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Apskatīt un apstrādāt rētu ar tīru ūdeni un neitrālām ziepēm vismaz vienu reizi dienā.
- Pirms gēla uzlikšanas rūpīgi nosusināt ādu sausu.
- Uzklāt gēlu plānā kārtiņā, ar vienu kustību, neļaujot tam iesūkties.
- Pēc izmantošanas labi aizvērt tūbiņu.

Ieteicams uzklāt gēlu CEREDERM® 2 reizes diennaktī (no rīta un vakarā).

ĪPAŠIE NORĀDĪJUMI

- Gēlu CEREDERM® nekādā gadījumā nedrīkst uzklāt uz gļotādas.
- Izvairīties no iekļūšanas acīs.
- Ilgstošas ādas reakcijas gadījumā pārtraukt terapiju un konsultēties ar ārstējošo ārstu.
- Gēls CEREDERM® paredzēts tikai ārīgai lietošanai.
- Gēls CEREDERM® nenodrošina aizsardzību pret ultravioletajiem stariem.
- Īpašo norādījumu neievērošana gēla CEREDERM® lietošanā var radīt komplikācijas un kavēt labu sadzīšanu.

GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.

Gēlu CEREDERM® uzglabāt istabas temperatūrā (ne augstākā par 25°C).

Iepakojums: plastikāta tūbiņa 15g

Ražotājs: Cereplas, Francija